



Medi MTM kompresivni rukavi i čarape za limfedem i lipedem

Rukavi i čarape izrađene po individualnim mjerama i potrebama pacijenta

Made to measure odnosno kompresivni rukavi i čarape rađene po individualnim mjerama pacijenta su danas zlatni standard u limfnoj terapiji. Mjere uzima ljekar specijalista, pod pritiskom i bez. Proizvodi su pleteni tehnikom ravnog pletenja, time se postiže snažnija radna kompresija i veća stabilnost tkanine, koja ne dopušta širenje otoka. Sa odgovarajućim ravno pletenim kompresivnim odjevnim predmetom (hulahopka, natkoljena čarapa, rukavica itd...) se postiže adekvatno terapijsko djelovanje koje podrazumjeva radnu kompresiju, mikro masažu i stabilnost tkanine. Elastičnost ovih proizvoda mora biti ista kao kod kratko elastičnih zavoja, te ona se može postići samo ravno pletenim kompresivnim odjevnim predmetom.

Djelovanje ravno pletenih odjevnih predmeta:

- Smanjuje edem, tako što pomjera višak tečnosti iz međuprostornog tkiva.
- Smanjuje pritisak na vene.
- Umanjuje količinu limfe u međuprostornom tkivu.
- Povećava produkciju limfe.
- Povećava kapacitet transportovane limfe.

Indikacije:

Kompresivna klasa I

- Medicinske indikacije: Edem, nastao kao rezultat neaktivnosti (neurološki deficit), rani AOD (arterijska okluzivna bolest), srčane komorbidnosti, Sudeckova artrofija, pacijenti koji boluju od reumatizma, komplikacije usljed dijabetesa.
- Indikacije povezane sa pacijentom: fizička onesposobljenost.

Kompresivna klasa II

- Limfedem ruke I-II stepena.
- Limfedema I stepena.
- Lipoedem I-II stepena bez edema i znakova limfostaze (znakovi limfnog saljevanja u određenim regijama tijela).

Kompresivna klasa III

- III stepena limfedema, bez sekundarnih oboljenja
- Limfedem II stepena
- Lipedem II stepena

Kompresivna klasa IV

- Limfedem III stepena



Kontraindikacije:

Apsolutne kontraindikacije:

- Napredna periferno arterijska okluzivna bolest.
- Edem povezan sa zatajenjem srca
- Septički flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens
- Skleroderma



Relativne kontraindikacije

- Erysipelas
- Intolerancija kompresivnog materijala
- Teška senzitivnost udova
- Dijabetes melitus
- Primarni hronični polyarthritis

Rizici i nuspojave

- Ravno pletene kompresivne čarape koje ne odgovaraju adekvatno po veličini i mjerama, mogu dovesti do nekroze tkiva, poremećaja pritiska na perifernim nervima i duboke venske tromboze.

Indikacije za kompresivne jastučice

Kompresivni jastučići se koriste namjenski u regijama kao što su zglobovi, poledina stopala i ruku, kako bi efektivnije rasporedili pritisak. Jastučići se prave od silikona i pjene, mogu biti individualno izrađeni i podešeni. Jastučići se mogu ubaciti u namjenske džepove ili samo u kompresivni odjevni predmet.

Modeli Mediven MTM

Mediven 550 za noge i ruke

Pruža maksimalnu stabilnost tkanine i bezbroj varijacija – namjenjena za edem do III stepena.

- Zahvaljujući stabilnosti tkanine medi 550 postiže najjaču radnu kompresiju.
- Dostupan je u bezbroj varijacija, individualno se prilagođava potrebama svakog pacijenta.
- Moderan dizajn, dostupne su u 10 različitih boja i 3 moguća dezena.

Mediven Mondi

Udobno i efikasno – namjnjeno za edem do II stepena.

- Tkanina posjeduje antibakterijska svojstva, te zbog toga je idealna za pacijente sa hroničnim ranama i atopičnim dermatitisom.
- Dostupan je u različitim kombinacijama, te se može individualno prilagoditi potrebama svakog pacijenta.
- Moderan dizajn, dostupne su u 10 raličitih boja.